

Indikacije

Cavex Outline, otisna pasta bez eugenola je materijal za pravljenje otisaka za vilicu bez zuba. Izmešana otisna pasta teče polako pod malim pritiskom, sprečavajući distorziju mekog tkiva i omogućava da otisak precizno reprodukuje detalje.

Zbog ovog razloga, Cavex Outline, otisna pasta bez eugenola je odgovarajuća za podešavanje osnovice i uzimanja sekundarnog otiska individualnom kašikom.

Ne sadrži eugenol i zato je visoko-bezbedna za pacijenta.

Doziranje

Cavex Outline, otisna pasta bez eugenola postoji kao sistem od dve paste, kontrastnih boja, plave i bele. Treba istisnuti jednake dužine obe paste u odgovarajućoj proporciji za mešanje: 1 g plave paste prema 2,2 g bele paste.

Napomena: u svim drugim proporcijama mešanje će trajati duže.

Mešanje

Pomešajte dobro dve paste na ploči za mešanje koristeći nerđajuću, čeličnu špatulu dok se ne dobije mešavina ujednačene boje. Za to je potrebno oko 30 sekundi. Špatulu je najbolje očistiti maramicom pre korišćenja.

Uzimanje otiska

Staviti pripremljenu pastu na protezu i ili otisnu kašiku i postaviti u usta slabim pritiskom nakon 1 ½ minut od mešanja paste. Drži se u ustima oko 2-3 minuta. Ukloniti kašiku iz usta i pažljivo isprati otisak tekućom, hladnom vodom.

Pravljenje gipsanog kalupa

Otisak se može odmah kalupiti gipsom. Otisak je dimenzionalno stabilan do 7 dana.

Odlike

Tipične vrednosti za Cavex Outline, pastu bez eugenola su izmerene prema ADA specifikaciji br. 16 su :

konzistencija	33 mm
inicijalno vreme postavljanja	3 min
finalno vreme postavljanja	4 min
penetracija	1,3 mm
površina kalupa	odgovara

Naši tehnički saveti su dati sa dobrom namerom, ali bez garancije, to se takođe odnosi na vlasnička prava kada je uključena treća strana. To vas ne oslobađa obaveze da testirate naše proizvode u namenjenim procesima i upotrebi. Aplikacija, upotreba i obrada su van naše kontrole i samim tim van naše odgovornosti. Tako da to može smanjiti vrednost naših proizvoda vašom upotrebom. Mi ćemo, naravno obezbediti kvalitet sastojaka naših proizvoda u skladu sa Dobrom praksom prodaje i isporuke.

Čuvati na temperaturi ispod 25° C