

Glas-jonomer cement za cementiranje. Njegove izvanredne karakteristike uključuju malu rastvorljivost u ustima i slabu kiselost.

Indikacije

Za cementiranje kruna, mostova, inleja-onleja, postova i ortodontskih bravica.

Aplikacija

Gleđ, dentin i metalni prostor temeljno očistiti i osušiti. Uverite se da nije ostalo tragova drugih materijala, jer to može smanjiti svojstva glas jonomer cementa. Privremeni rad je poželjno raditi sa cementom bez eugenola. Pre pričvršćivanja očistiti (na primer sa H₂O₂) i osušiti. Kada se koristi glas jonomer cement prvi put, skinuti kapicu sa boce a zatim učvrstiti pipetu na bocu.

Promešajte dobro prašak pre upotrebe!

Radna temperatura treba da bude 15-23°C.

Koristite jednu kap tečnosti na jednu mernu kašičicu praška (prašak / tečnost odnos = 3.0:1 g/g).

Stavite prah i tečnost u odgovarajući stakleni tanjir ili odgovarajuću pločicu za mešanje. Kada podelite tečnost, držite kapaljku boce vertikalno. Vreme mešanja je otprilike 30 sekundi. Sa glas jonomer luting cementom može da se radi 30 minuta na sobnoj temperaturi i da se postavlja 5-7 minuta (uključujući 3-5 minuta u ustima). Viša temperatura skraćuje vreme rada, a niža temperatura smanjuje.

Postiže se odgovarajuća konzistencija kada se glas jonomer luting cement primenjuje na krunicu sa tvrdom četkicom. Neophodno je izbegavati kontakt vode i pljuvačke tokom aplikacije i postavljanja.

Indikacije/Mere predostrožnosti

Višak materijala se može ukloniti sondom, posle 10-15 minuta. Smanjite osetljivost površine krunice sa glazurom fluorida. Ostatak glazure i drugih supstanci (na primer eugenola, izolaka) može uticati na adheziju i potrebno ga je potpuno ukloniti pre koršćenja luting cementa.

Cement nemojte aplikovati prekomerno preblizu dentina kako bi izbegli iritaciju pulpe. Ako je neophodno zaštititi pulpu (kalcijum-hidroksidom) ili izvaditi krunicu, ako je indikovano.

Isprati instrumente od ostatka cementa hladnom vodom odmah nakon upotrebe pre nego se ostaci cementa stvrdnu. Nakon uklanjanja ortodontskih bravica, ostaci cementa treba da se uklone nežno i brzo sa ultrasoničnom sondom.

Glas jonomer cement sadrži poliakrilne kiseline, fluoro-silikat i parabene. Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na neki od sastojaka.

Informacije o čuvanju

Zatvoriti ambalažu praška odmah nakon upotrebe, da bi se izbegla apsorpcija vlage koja može rezultirati gubitkom kompresivne snage.

Čuvati na temperaturi 4-23°C

Naši tehnički saveti su dati sa dobrom namerom, ali bez garancije, to se takođe odnosi na vlasnička prava kada je uključena treća strana. To vas ne oslobađa obaveze da testirate naše proizvode u namenjenim procesima i upotrebi. Aplikacija, upotreba i obrada su van naše kontrole i samim tim van naše odgovornosti. Tako da to može smanjiti vrednost naših proizvoda vašom upotrebom. Mi ćemo, naravno obezbediti kvalitet sastojaka naših proizvoda u skladu sa Dobrom praksom prodaje i isporuke.