

CAVEX TEMPORARY CEMENT koristi se za cementiranje privremenih kruna i mostova. Ne sadrži eugenol, pa neće inhibirati polimerizaciju kompozitnog cementa. Takođe, neće inhibirati postavljanje nijednog drugog kompozitnog ispuna.

CAVEX TEMPORARY CEMENT sastoji se od dve paste, koje treba pomešati posle istiskivanja jednakih količina obe paste. BAZA (35 g) je mešavina biljnog ulja sa magnezijum-oksikom i cink-oksikom. KATALIZATOR pasta (16 g) sadrži dimerne masne kiseline u mešavini voskova i smola, a mala količina kiseline ubrzava reakciju sa cink oksidom BASE paste.

Za razliku od sličnih proizvoda, ostatak cementa koji ostaje na zubnoj površini nakon uklanjanja privremenih kruna, moguće je lako ukloniti zbog žute boje koja se razlikuje od boje dentina.

Indikacije

Cementiranje privremenih kruna i mostova.

CAVEX TEMPORARY CEMENT ne sadrži eugenol i neće sprečiti postavljanje cementa ili kompozitnih ispuna.

CAVEX TEMPORARY CEMENT u potpunosti odgovara ISO standardu 3107 „Dentalni cink-oksik /eugenol cement i cink-oksik/bez eugenola cement“ tipa I.

Uputstvo za upotrebu

Istisnuti iste količine BAZE (bela) i KATALIZATOR (žuta) paste na površinu za mešanje, koja je priložena u pakovanju. Razmera mešavine po težini je 2.2:1.

Napomena: Za cementiranje većih privremenih mostova preporučuje se korišćenje slabijih cementa. Takvi mostovi se mogu lakše ukloniti. U takvim slučajevima se preporučuje da sadržaj paste u mešavini bude za 10-20% veći u odnosu na navedenu srazmeru.

Dve paste se mešaju čeličnom, nerđajućom špatulom dok se ne dobije homogena žuta pasta. Obično je potrebno oko 30 sekundi. Staviti mešavinu na privremenu krunu ili most i postaviti ga na preparaciju. Vreme postavljanja u ustima je otprilike oko 1,30-2 minuta.

Nakon postavljanja ukloniti višak cementa.

Špatula može lako da se očisti maramicom pre nego što se cement stegne.

Preporučuje se upotreba **CAVEX TEMPORARY CEMENT** na sobnoj temperaturi i vlažnosti.

Svojstva

- Vreme mešanja : 30 sekundi
- Radno vreme : 2.30 minuta
- Vreme postavljanja : 4.00-7.00 minuta
- Vreme postavljanja u ustima : 1.30-2 minuta

Proizvedeno u EU

SAMO ZA UPOTREBU U STOMATOLOGIJI

Naši tehnički saveti su dati sa dobrom namerom, ali bez garancije, to se takođe odnosi na vlasnička prava kada je uključena treća strana. To vas ne oslobađa obaveze da testirate naše proizvode u namenjenim procesima i upotrebi. Aplikacija, upotreba i obrada su van naše kontrole i samim tim van naše odgovornosti. Tako da to može smanjiti vrednost naših proizvoda vašom upotrebom. Mi ćemo, naravno obezbediti kvalitet sastojaka naših proizvoda u skladu sa Dobrom praksom prodaje i isporuke.